

FICHE CONSEIL D'UTILISATION (détachable)

sigvaris ATH

La gamme ATH est indiquée dans la prévention de la thrombose veineuse, dans un contexte médical ou chirurgical.

TABLEAU DE TAILLAGE

Taille	Cheville B	Mollet C	Cuisse M
1	17 - 20	29 - 36	45 - 60
2	20 - 23	32 - 39	48 - 63
3	23 - 26	36 - 43	54 - 69
4	26 - 29	40 - 47	58 - 73
5	29 - 32	44 - 51	62 - 77


B Cheville : Prise de mesures 3 cm au-dessus de la malléole, sur la partie la plus fine.

M Cuisse, C Mollet : Prise de mesures à l'endroit le plus large.

Hauteur	½ jambe A-D	Jambe A-G
Normal	< 41	< 77
Long	>41	> 77


A - D ½ jambe : Du sol jusqu'à 2 doigts en dessous du genou.

A - G Jambe : Du sol à l'entrejambe.

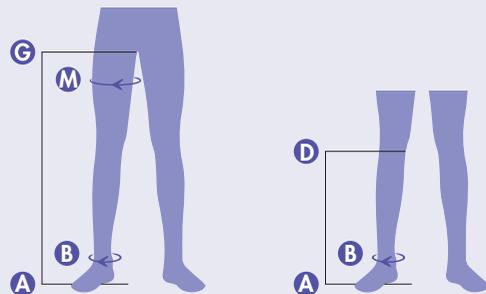

Pour enfiler les produits ATH

3 ÉTAPES COMMUNES CHAUSSETTES ET BAS

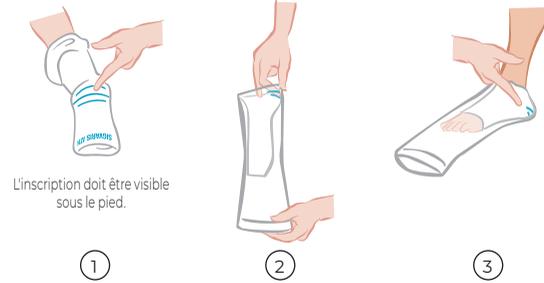

L'inscription doit être visible sous le pied.


1 Introduisez la main à l'intérieur du produit et pincez le trait bleu central du talon.

2 Retournez le produit jusqu'à hauteur du trait bleu central.

3 Introduisez le pied dans le produit et positionnez le trait bleu central sur le talon.

CHAUSSETTES

BAS

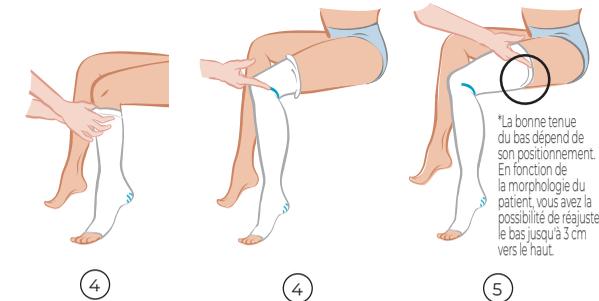

4 Déroulez la chaussette jusqu'en dessous du genou.

4 Déroulez le bas en positionnant les 3 traits bleus sur le talon et le trait bleu au niveau du creux poplité.

5 Déroulez le bas jusqu'à mi-cuisse*.

*La bonne tenue du bas dépend de son positionnement. En fonction de la morphologie du patient, vous avez la possibilité de réajuster le bas jusqu'à 3 cm vers le haut.

Après avoir positionné le produit, massez les jambes de bas en haut pour répartir la matière.

Indications

Bas de compression médicale entre 15 et 20 mmHg

- Prévention de la thrombose veineuse dans un contexte chirurgical (en association avec un traitement pharmacologique ou seul en cas de contre-indications) ou médical (hors accident vasculaire cérébral) chez les patients en décubitus prolongé.

- Prévention de la thrombose veineuse en cas d'intervention chirurgicale à risque thrombo-embolique veineux (la compression est utile en association au traitement anticoagulant, ou seule lorsque ce traitement est contre-indiqué).

- Prévention de la thrombose veineuse dans les situations à risque (infections avec fièvre prolongée, cancers à risque de thrombose, insuffisances cardiaques, antécédents de thrombose veineuse).

Contre-indications

- Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec index de pression systolique (IPS) < 0.6.

- Phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle).

- Thrombose septique.

- Intolérance au produit.

- Insuffisance cardiaque sévère.

Précautions d'emploi

En cas d'AOMI avec un IPS > 0.6 et < 0.9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques doit être effectuée.

En cas de douleur ou d'inconfort, le produit doit être retiré. Tout incident grave survenu en lien avec le produit devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Une observation régulière par un professionnel de santé est recommandée pour vérifier l'état des jambes du patient. Pied ouvert pour permettre l'examen des tissus cutanés.

sigvaris

ATH

LOT DE
10 PAIRES

La gamme ATH est indiquée dans la prévention de la thrombose veineuse, dans un contexte médical ou chirurgical.

Notice d'utilisation

DISPOSITIF DE COMPRESSION MÉDICALE
ANTI-THROMBOSE

La compression comment ça marche ?

La compression médicale est indiquée dans la prévention de la thrombose veineuse⁽¹⁾.

Les produits de compression médicale (chaussettes et bas) sont des solutions thérapeutiques qui contribuent à améliorer le retour veineux en exerçant une pression active le long de la jambe, à lutter contre l'hyperpression et la stase veineuse et à favoriser la circulation veineuse et le retour du sang vers le cœur.

Nos recommandations

- ▶ Une prise de mesures par un professionnel de santé est indispensable pour garantir un niveau de compression adapté et une efficacité optimale. Prise de mesures préopératoires ou lors de la consultation d'anesthésie.
- ▶ Enfilage préopératoire, sauf en chirurgie orthopédique du membre inférieur, où l'enfilage est réalisé immédiatement après l'intervention.
- ▶ Les produits doivent être enfilés de préférence sur une peau propre et sèche.
- ▶ Les produits ne doivent pas être utilisés sur une peau lésée.
- ▶ Vérification au moment de l'enfilage de l'absence des contre-indications de la compression.
- ▶ Port bilatéral continu jour et nuit dès l'admission et tant que persiste le risque thrombo-embolique (même si reprise de la marche).
- ▶ La durée du traitement compressif est en fonction de la durée du risque thrombo-embolique
- ▶ Chez les patients ayant par ailleurs une compression par bas, les chaussettes antithrombose ne sont recommandées que pendant la période d'alitement. Le relai est pris ensuite par le traitement compressif habituel.
- ▶ Chaque paire est destinée à un seul patient pendant la période d'hospitalisation.
- ▶ Ne pas utiliser les produits ATH avec une compression pneumatique intermittente (si le patient en porte, il faut l'enlever).
- ▶ Ne pas stériliser les produits.

Les atouts de la gamme sigvaris ATH

Les chaussettes et bas anti-thrombose sont indiqués dans la prévention de la thrombose veineuse, dans un contexte médical ou chirurgical. Ils peuvent être portés dans le cadre de l'utilisation d'un bistouri électrique conformément au respect de la notice du fabricant de ce dernier⁽²⁾.

▶ Efficacité conforme, testée et évaluée* :

- Pression à la cheville entre 15 et 20 mmHg
- Dégressivité : pression au mollet de 50 à 80% de la pression à la cheville
- Durabilité > 7 semaines
- Les produits ATH supportent 50 lavages à 60° C tout en conservant leur efficacité

* Mesures réalisées par le laboratoire de l'Institut Français du Textile et de l'Habillement - 06/2020 - Pression obtenue selon la norme NF G 30-102B.

▶ Un système de taillage mixte, pratique et qui permet d'équiper plus de 92% des morphologies**:

- Même système de taillage pour chaussettes et bas (5 tailles, 2 hauteurs)

** % de couverture obtenu à partir de la base de données IFTH regroupant 9 096 personnes .

▶ Simple d'utilisation :

- Positionnement facilité
- Prise de mesures simplifiée

POUR ENTREtenir VOTRE PRODUIT



Lavez en machine, programme à 60°C.



N'utilisez pas d'assouplissant.



Séchez loin de toute source de chaleur.

COMPOSITIONS

Des chaussettes : 68 % Polyamide ; 31 % Elasthanne ; 1 % Polyester.

Des bas : 61 % Polyamide ; 33 % Elasthanne ; 3 % Polyester ; 3 % Silicone.

SERVICE CLIENTS



Appelez-nous au :

03 89 70 24 24 Service gratuit + prix appel

du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 14h-18h



FAX **03 89 69 48 49**



Écrivez-nous à : **commandes@sigvaris.com**



Télétransmission **PHARMA ML**
Pour toute demande, merci de nous contacter à l'adresse suivante : **serviceclients_fr@sigvaris.com**

Les chaussettes et bas de compression médicale SIGVARIS ATH sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (Règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS.

Ces dispositifs sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Lisez attentivement la notice d'utilisation notamment pour les indications et contre-indications.

(1) HAS. Dispositifs de compression médicale à usage individuel - Utilisation en pathologies vasculaires. Septembre 2010.
(2) - Éloignement du bas d'au minimum 10 cm par rapport au bistouri, pour ne pas risquer d'inflammation du bas au contact de l'électrode du bistouri - Isolation du patient au regard de la table opératoire par des procédés classiques (le bas ne constitue pas lui-même un isolant et ne doit donc pas être utilisé à cette fin) - En utilisation monopolaire du bistouri, l'électrode neutre ne doit pas toucher le bas. Produit testé selon la norme EN 1149-2 (détermination de la résistance électrique verticale).



Produit fabriqué sous Système de Management de la Qualité certifié AFAQ ISO 9001



Sigvaris is a registered trademark of SIGVARIS AG, St. Gallen / Switzerland, in many countries worldwide.
© Copyright 2020, by SIGVARIS St-Just St-Rambert, France.
Fabricant : SIGVARIS - ZI Sud d'Andrézieux - Rue B. Thimonnier - 42170 St-Just-St-Rambert

Pour enfiler les produits ATH

3 ÉTAPES COMMUNES CHAUSSETTES ET BAS



L'inscription doit être visible sous le pied.

①

Introduisez la main à l'intérieur du produit et pincez le trait bleu central du talon.



②

Retournez le produit jusqu'à hauteur du trait bleu central.



③

Introduisez le pied dans le produit et positionnez le trait bleu central sur le talon.

CHAUSSETTES

BAS



④

Déroulez la chaussette jusqu'en dessous du genou.



④

Déroulez le bas en positionnant les 3 traits bleus sur le talon et le trait bleu au niveau du creux poplité.



⑤

Déroulez le bas jusqu'à mi-cuisse*.

*La bonne tenue du bas dépend de son positionnement. En fonction de la morphologie du patient, vous avez la possibilité de réajuster le bas jusqu'à 3 cm vers le haut.

Après avoir positionné le produit, massez les jambes de bas en haut pour répartir la matière.