

Pour vous accompagner

UN SITE INTERNET DÉDIÉ À VOTRE GROSSESSE

Vos jambes sont mises à rude épreuve pendant la grossesse ! C'est le moment d'en prendre soin car certains troubles veineux ne doivent surtout pas être négligés.

Retrouvez des informations médicales, des conseils santé, des témoignages, des vidéos et toute l'offre Sigvaris pour vivre une grossesse épanouie sur le site : www.9moismesjambesetmoi.com



Retrouvez-nous également sur  

SERVICE CONSOMMATEURS

Appelez-nous au :



0 969 320 966

Service gratuit
+ prix appel

du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 14h-18h



Écrivez-nous à :
services.consommateurs@sigvaris.com

Nos recommandations

- ▶ Une prise de mesures par un professionnel de santé est indispensable pour garantir un niveau de compression adapté et une efficacité optimale. Pendant votre grossesse, il est conseillé de reprendre vos mesures régulièrement et d'ajuster la taille de votre produit si besoin.
- ▶ Laver les produits avant la première utilisation.
- ▶ Les produits doivent être enfilés de préférence dès le matin sur une peau propre et sèche.
- ▶ Ne pas utiliser sur une peau lésée.

POUR ENFILER VOTRE COLLANT

- 1 Introduisez la main à l'intérieur de la première jambe et pincez le talon.
- 2 Retournez votre collant jusqu'à hauteur du talon.
- 3 Introduisez votre pied dans le collant en positionnant correctement le talon.
- 4 Déroulez le collant sur votre jambe jusqu'au genou.
- 5 Passez à la seconde jambe en suivant les mêmes étapes.
- 6 Remontez le collant jusqu'à l'entrejambe et veillez à bien positionner la ceinture sur votre ventre.

Retrouvez notre vidéo d'aide à l'enfilage sur notre site www.9moismesjambesetmoi.com

LE TRUC EN +

UN PETIT MASSAGE QUI CHANGE TOUT
Massez vos jambes de bas en haut, afin de bien répartir le textile et favoriser le retour veineux. Bien en place, votre produit est plus efficace !

POUR ENTREtenir VOTRE COLLANT



Lavez en machine, programme délicat à 30°C.



N'utilisez pas d'assouplissant.



Séchez loin de toute source de chaleur.

- ▶ Pour prolonger la vie de vos produits, utilisez un filet de lavage.

Indications

- ▶ **Bas de compression médicale entre 10 et 15 mmHg (entre 13 et 20 hPa, classe I)**
 - Troubles fonctionnels et douleurs de l'insuffisance veineuse, liés à la station debout prolongée.
 - Mauvaise acceptabilité du patient au port d'un bas de classe 2.
 - En superposition pour atteindre des pressions supérieures.
- ▶ **Bas de compression médicale entre 15,1 et 20 mmHg (entre 20,1 et 27 hPa, classe II)**
 - Prévention de la thrombose veineuse dans un contexte chirurgical (en association avec un traitement pharmacologique ou seul en cas de contre-indications) ou médical (hors accident vasculaire cérébral) chez les patients en décubitus prolongé.
 - Varices de plus de 3 mm (C2).
 - Après chirurgie ou sclérothérapie de varices de plus de 3 mm, pendant 4 à 6 semaines.
 - Prévention de la thrombose veineuse pendant la grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après une césarienne).
 - Prévention de la thrombose veineuse en cas d'intervention chirurgicale à risque thrombo-embolique veineux (la compression est utile en association au traitement anticoagulant, ou seule lorsque ce traitement est contre-indiqué).
 - Prévention de la thrombose veineuse dans les situations à risque (infections avec fièvre prolongée, cancers à risque de thrombose, insuffisances cardiaques, antécédents de thrombose veineuse).
 - En superposition pour atteindre des pressions supérieures.
- ▶ **Bas de compression médicale entre 20,1 et 36 mmHg (entre 27,1 et 48 hPa, classe III)**
 - Varices de plus de 3 mm (C2).
 - Après chirurgie ou sclérothérapie des varices de plus de 3 mm, pendant 4 à 6 semaines.
 - Œdème veineux chronique (C3).
 - Troubles trophiques (pigmentation, eczéma) d'origine veineuse (C4a).
 - Troubles trophiques chroniques (lipodermatosclérose ou hypodermite d'origine veineuse, atrophie blanche) d'origine veineuse (C4b chronique).

- Troubles trophiques d'origine veineuse avec ulcère cicatrisé (C5).
- Traitement de la thrombose veineuse superficielle du membre inférieur, le plus tôt possible après le diagnostic (en association au traitement anti-thrombotique si celui-ci est indiqué ou seul).
- Traitement de la thrombose veineuse profonde du membre inférieur, à la phase aiguë, le plus tôt possible après le diagnostic (en association avec le traitement pharmacologique ou seul en cas de contre-indications).
- Prévention du syndrome post-thrombotique après une thrombose veineuse profonde proximale, pendant 2 ans.
- Lymphoedème (en deuxième intention à la phase décongestive, et en première intention à la phase de maintien). La pression retenue est la plus forte supportée par le patient. Elle peut être atteinte par superposition de plusieurs bas, sans limite.
- Prévention de la thrombose veineuse pendant la grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après une césarienne) en cas d'affection veineuse chronique associée.
- En superposition pour atteindre des pressions supérieures.

- ▶ **Bas de compression médicale supérieure à 36 mmHg (au-dessus de 48 hPa, classe IV)**
 - Troubles trophiques d'origine veineuse avec ulcère cicatrisé (C5).
 - Traitement de l'ulcère actif (C6) jusqu'à cicatrisation complète.
 - Prévention du syndrome post-thrombotique après une thrombose veineuse profonde proximale, pendant 2 ans.
 - Lymphoedème (en deuxième intention à la phase décongestive et en première intention à la phase de maintien). La pression retenue est la plus forte supportée par le patient. Elle peut être atteinte par superposition de plusieurs bas, sans limite.
 - Prévention de la thrombose veineuse pendant la grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après une césarienne) en cas d'affection veineuse chronique associée.
 - En superposition pour atteindre des pressions supérieures.

Contre-indications

Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6, microangiopathie diabétique évoluée pour les bas délivrant une pression > 30 mmHg, phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), thrombose septique, intolérance au produit.

Précautions d'emploi

En cas d'AOMI avec un IPS > 0,6 et < 0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfice/risques doit être effectuée.

En cas de douleur ou d'inconfort retirez le produit et consultez votre professionnel de santé. Tout incident grave survenu en lien avec le produit devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

sigvaris



*Notice d'utilisation incluse

Maternité

Mon petit guide de la compression*

Un savoir-faire reconnu

Au sein de SIGVARIS GROUP nous pensons qu'il est fondamental d'avoir le bon partenaire santé à ses côtés. C'est pourquoi nous nous employons à proposer un ensemble de solutions complémentaires, couvrant toutes les exigences en matière de compression.

Nos offres reposent sur des marques répondant à des besoins distincts et à des pathologies différentes (insuffisance veineuse chronique, lymphoedème, thrombose veineuse profonde), et capitalisent sur nos 150 ans d'expertise médicale. Chacune de nos marques a été soigneusement conçue pour proposer la meilleure solution aux femmes et aux hommes porteurs de compression. sigvaris est aujourd'hui la marque la plus connue et la plus conseillée par les gynécologues et les sages-femmes ⁽¹⁾.

Engagés dans le développement de réponses médicales pertinentes, nous innovons sans cesse pour améliorer la qualité de vie des personnes, chaque jour.

CONCEPTION,
FABRICATION,
COMMERCIALISATION :
DU 100 % FRANÇAIS !



Les atouts de la gamme sigvaris

Nos produits sont testés auprès d'une communauté experte de porteurs.

► Efficace :

- Pression dégressive tout au long de la jambe.
- Tailage adapté à toutes les morphologies.

► Confortable et facile à enfiler :

- Forme anatomique intégrée dès la conception du produit.
- Bande auto-fixante qui présente une bonne tolérance cutanée.

► Qualité Premium :

- Produits fabriqués en France.
- Exigence dans la sélection des fibres.

► Un large choix de produits pour chaque situation de vie.



La compression comment ça marche ?

La compression médicale est le traitement de base des maladies veineuses et lymphatiques. Elle est recommandée pendant toute la grossesse, et après, par les autorités de santé ⁽³⁾.

Les produits de compression médicale (chaussettes, bas et collants) sont des solutions thérapeutiques qui contribuent à améliorer le retour veineux. Ils exercent une pression active le long de la jambe favorisant la circulation veineuse et le retour du sang vers le cœur.

- Les conditions d'utilisation et de renouvellement sont à demander à votre prescripteur (médecin, infirmier, sage-femme etc...).

Comment choisir votre compression ?

Pour votre grossesse, Sigvaris vous propose une gamme claire, complète et adaptée à chaque situation de vie.

Vous cherchez un produit facile à porter au quotidien ? Un produit adapté à des usages spécifiques ? Trouvez le produit qui vous correspond le mieux.

MATERNITÉ

- Idéal pour votre grossesse, collant avec ceinture évolutive inédite et innovante



COLLANT MATERNITÉ

- Ceinture évolutive
- Soutien ventral
- Existe en transparent et opaque

ESSENTIEL

- Des produits confortables et faciles à porter au quotidien

SEMI-TRANSPARENT

- Confort ⁽²⁾
- Résistant ⁽³⁾



STYLES

- Un large choix de coloris, de motifs et de textures pour un look tendance et élégant



TRANSPARENT

- Finesse
- Discrétion
- Nude Effect ⁽⁴⁾



MOTIFS

- Losanges
- Résilles
- Crochets



OPAQUE

- Douceur ⁽⁵⁾
- Facilité d'enfilage ⁽⁶⁾



MOTIFS MARINIÈRE ⁽⁷⁾

- Tendance
- Confort

ACTIVE

- Des produits techniques adaptés aux moments de loisirs et aux activités en toute saison



CONFORT FRAÎCHEUR

- À base de lin



CONFORT CHALEUR

- À base de soie



LOISIRS

- À base de bambou



RÉSISTANT ⁽⁸⁾


- Adapté aux chaussures de sécurité

Retrouvez plus d'informations sur notre site www.sigvaris.com

Après l'accouchement...

Continuez à veiller sur vos jambes, un risque accru de thrombose veineuse profonde demeure jusqu'à la 12^e semaine après l'accouchement ⁽¹¹⁾. Pendant quelques mois, vos jambes sont aussi plus vulnérables à l'insuffisance veineuse.

LES MODÈLES ET LES COLORIS

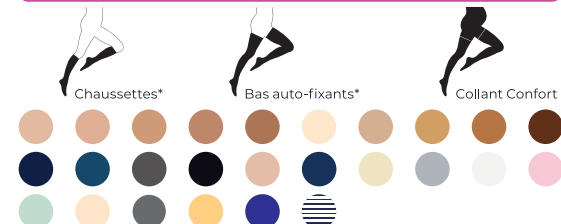

Les produits de compression médicale Sigvaris sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (règlement 2017/745) fabriqués par SIGVARIS. Ces dispositifs sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Lisez attentivement la notice d'utilisation. Demandez conseil à votre professionnel de santé.

⁽¹⁾ Étude réalisée par Enov Fieldwork auprès de 150 sages-femmes et 150 gynécologues. Mai 2016. ⁽²⁾ Bande auto-fixante : Bonne tolérance cutanée chez 90% des volontaires - Étude CERT, CHU Saint-Jacques de Besançon auprès de 30 personnes - 2008. ⁽³⁾ HAS. Dispositifs de compression médicale à usage individuel - Utilisation en pathologies vasculaires. Septembre 2010. ⁽⁴⁾ Confort : 94% de satisfaction - Étude Harris Interactive auprès de 35 femmes - 10/2018. ⁽⁵⁾ Résistant : 93% de satisfaction - Étude Feetest auprès de 30 femmes - 06/2014. ⁽⁶⁾ Nude effect : Étude Certensis auprès de 153 femmes - 10/2017. ⁽⁷⁾ Douceur : 93% de satisfaction - Étude Harris Interactive auprès de 29 femmes - 10/2018. ⁽⁸⁾ Facilité d'enfilage : 86% de satisfaction - Étude Harris Interactive auprès de 29 femmes - 10/2018. ⁽⁹⁾ Fil antibactérien à base de verre de phosphate d'argent (Numéro CAS : 308069-39-8). ⁽¹⁰⁾ Fil antibactérien à base d'ions d'argent (Numéro CAS Résistant : 265647-11-8). ⁽¹¹⁾ Olié V, et al. Maladie veineuse thromboembolique pendant la grossesse et le post-partum, France, 2009-2014. www.invs.santefr.fr/ben/2016/7-8/2016_7-8_6.html.

Sigvaris, is a registered trademark of SIGVARIS AG, St. Gallen / Switzerland, in many countries worldwide. © Copyright 2018, by SIGVARIS - St-Just St-Rambert, France Fabricant : SIGVARIS - ZI Sud d'Andrézieux - rue B. Thimonnier 42170 St-Just St-Rambert

